

GENGIGEL® **forte** Oralni gel

*Idealan za primjenu na rane i tijekom postoperativne faze
Posebno oblikovan radi jednostavne, brze i učinkovite upotrebe*

Hijaluronska kiselina s visokom molekulskom masom posebno je koncentrirana u vanjskim slojevima gingivalnoga tkiva, gdje doprinosi zaštitnoj funkciji i vlačnoj čvrstoći parodontalnoga ligamenta. Njezina prisutnost nužna je za održavanje zdravoga gingivalnoga tkiva.

Hijaluronska kiselina ima puno korisnih svojstava koja doprinose uspješnom stomatološkom liječenju i higijeni usne šupljine.

Osobito je svojstvo hijaluronske kiseline i to što može apsorbirati 50 puta veću količinu vode od vlastite suhe mase.

Ta značajka, zajedno s molekulskom strukturom hijaluronske kiseline kad je otopljena u vodenoj okolini, omogućuje joj da djeluje poput zaštite od prodora mikroorganizama i drugih toksina koji najvjerojatnije utječu na razvoj parodontne bolesti i tako pruža vrlo učinkovitu prirodnu zaštitu.

Zahvaljujući zaštitnoj barijeri, Gengigel® **Forte** pomaže smanjiti bol, potiče rekonstrukciju prirodnoga tkiva nakon traumatskih zahvata kao što su operacija, ugradnja implantata, vađenje zuba, struganje i poliranje korijena zuba itd. Ujedno potiče apsorpciju vode te tako smanjuje oteklinu i ublažava upalni proces.

Gengigel® Forte

- Sadrži biotehnološki proizvedenu, visokokvalitetnu i vrlo čistu hijaluronsku kiselinu neživotinjskoga podrijetla u obliku natrijeve soli s visokom molekulskom masom.
- Ima dugotrajno lokalno djelovanje.
- Zahvaljujući posebnom sastavu, prianja na sluznicu.
- Smiju ga upotrebljavati sve osobe bez ograničenja, pa tako i djeca, trudnice, stariji ljudi i dijabetičari.

Indikacije

S obzirom na značajke Gengigel® **Forte** posebno je indiciran za zaštitu sluznice:

- kod dubokih rana na desnim,
- kod upaljenih i/ili bolnih desni nakon traume, kirurških ili parodontalnih zahvata, vađenja zuba ili kod subgingivalnog struganja korijena zuba.

Uputa za upotrebu

Odmah nakon dentalnog zahvata nanosite malu količinu gela na oboljelo područje upotrebom kanile ili dobro operite ruke pa prstom razmažite gel i nježno ga utrljajte u desni dok oboljelo područje ne bude posve prekriveno.

Postupak ponovite jedanput do dvaput na dan ili po potrebi, osim ako vam stomatolog ne preporuči drukčije.

Sastojci

Glavni sastojak: Sodium Hyaluronate

Ostali sastojci: Aqua, Xylitol, Cellulose gum, Alcohol, Peg-40 Hydrogenated castor oil, Glycerophosphocholine, Sodium phosphate, Polyvinyl alcohol, Carbomer (Polycarbophil), Dichlorobenzyl alcohol, Trisodium phosphate, Sodium lactate, Sodium hydroxide.
(It may contain Citric acid).

Pakiranje

Gengigel® **Forte** oralni gel: tuba 8 ml

Kontraindikacije: Upotreba proizvoda Gengigel® **Forte** kontraindicirana je kod preosjetljivosti na bilo koji sastojak.

Mjere opreza i upozorenja: Ne upotrebljavajte proizvod ako na njemu primijetite vidljiva oštećenja.

Čuvajte na sobnoj temperaturi, zaštićeno od izvora topline. Ne upotrebljavajte nakon datuma isteka roka valjanosti. Prije nego što zatvorite tubu nakon upotrebe, uklonite sve ostatke proizvoda. Samo za osobnu upotrebu. Čuvajte izvan dohvata djece. Ako simptomi ne nestanu, posavjetujte se sa stomatologom.