

GENGIGEL® PROF „Syringes“

Periodontalni gel s 0,8% hijaluronskom kiselinom

Hijaluronska kiselina fiziološki je najvažniji proteoglikan koji je sastavni dio izvanstaničnog prostora sluznice. Zajedno s drugim komponentama vezivnog tkiva osigurava snagu i elastičnost nužnu za zdravlje usne šupljine.

Hijaluronska kiselina ima brojna svojstva koja omogućavaju uspješno održavanje higijene i zdravlja zubi i usne šupljine.

Hijaluronska kiselina apsorbira 50 puta veću količinu vode od vlastite mase.

Zahvaljujući tome, hijaluronska kiselina djeluje kao barijera pri prodoru mikroorganizama i drugih toksina koji uzrokuju parodontne bolesti.

Gengigel® Prof injekcijska štrcaljka

- Sadržava biotehnoški proizvedenu, visokokvalitetnu i vrlo čistu hijaluronsku kiselinu neživotinjskog podrijetla u obliku natrijeve soli.
- Ima dugotrajno lokalno djelovanje.
- Jedinstveni pripravak Gengigela omogućava oblaganje sluznice.
- Može se upotrebljavati bez ograničenja kod svih ljudi, pa i djece, trudnica, starijih osoba i dijabetičara.

Indikacije

- Pomaže i ubrzava regeneraciju tkiva nakon svih traumatskih stanja (kirurških zahvata, implantata, vađenja zuba, zubne kiretaže itd.).
- Nakon nekirurškog temeljitog debridementa smanjuje dubinu gingivalnoga džepa.
- Pomaže i ubrzava antiedematozni i protuupalni proces.
- Smanjuje krvarenje.

Gengigel® Prof injekcijske štrcaljke posebno su indicirane za sve oblike periodontitisa, uključujući ozbiljne slučajeve, stanja prije operacije i stanja kad rane prodiru duboko u tkivo.

Uputa za uporabu

Napunjenu injekcijsku štrcaljku s 1 ml morate upotrijebiti s posebno dizajniranim nastavkom s dugom i savitljivom plastičnom iglom koja omogućuje optimalnu aplikaciju Gengigel® Profa duboko u gingivalne džepove. Nakon skidanja zatvarača sa štrcaljke namjestite nastavak za jednokratnu uporabu.

Tako će štrcaljka biti spremna za uporabu.

Upozorenje

Proizvod za jednokratnu uporabu; ne nanosite ga na otvorene kirurške rane!

Uporaba nije preporučljiva pri dokazanoj preosjetljivosti na bilo koji sastojak Gengigela.

Čuvajte na temperaturi od 5 do 40 °C!

Proizvodi:

RICERFARMA srl

Via Egadi, 7 – 20144 Milano, Italija

Kontakt za RH:

Medis Adria d.o.o., Kolarova 7, Zagreb